

ANLEITUNG Blutentnahme - Probenvorbereitung

**Bitte Röhrchen gut leserlich beschriften mit
Vor- und Zuname + Geburtsdatum**

Allgemein empfohlene Abnahmezeit: zw. 7:00 und 9:00 Uhr am nüchternen Patienten

1. RÖHRCHEN OHNE GERINNUNGSHEMMER:

Roter Stoppel MIT Gel: Für Vollblut außer Blutgruppen (bitte Röhrchen bis zum Abschluss der Koagulation ca. 30 min. ruhig stehen lassen, nicht schütteln oder kippen) bzw. für dekantiertes Serum, dekantiertes Plasma oder Harn (bitte auf dem Röhrchen vermerken, wenn es sich um anderes Probenmaterial als Serum handelt!)

Roter Stoppel OHNE Gel: Für Blutgruppen (bitte Röhrchen bis zum Abschluss der Koagulation ca. 30 min. ruhig stehen lassen, nicht schütteln oder kippen)

2. RÖHRCHEN MIT GERINNUNGHEMMERN:

(bitte sofort nach der Blutentnahme mehrmals über Kopf schwenken, nicht schütteln!!) **Unbedingt die Füllmenge beachten (schwarze Markierung)**

Violetter Stoppel: Kalium-EDTA (Blutbild, Senkung, HbA1c, Leukozytentypisierung, HLA-Typisierung, Cadmium, Quecksilber, für ACTH und Histamin nach Entnahme kühlstellen und gekühlt transportieren)

Blauer Stoppel: Na-Citrat (Gerinnungsparameter, Röhrchen IMMER bis zur Strichmarke anfüllen!)

Grauer Stoppel: EDTA-Röhrchen mit Natriumfluorid als Glycolysehemmer (nur für Blutzucker und Lactat, für Lactat bitte kühlstellen und gekühlt transportieren)

Grüner Stoppel: Lithium-Heparinat (Myoglobin, Blei, EPP)

Weißer Stoppel: Homocystein-Röhrchen

**Bitte die Zuweisungszettel außerhalb der Kunststoffverpackung beifügen
(einzeln, gefaltet, Schrift nach außen)**